

Afname-instructie voor Vaginale uitstrijk *N.gonorrhoeae/Chl. trachomatis*

(eventueel afname door patiënt zelf)



Afnamesetje: -buis met gele dop


-1 wattenstok (swab) voor afname van de uitstrijk

Vagina uitstrijk :

1. Voorbereiding


- Was uw handen.
- Open de verpakking.
- Haal de wattenstok uit de verpakking.
- Zorg dat de wattenstok niets aanraakt.

Let op: De wattenstok **boven** het gekleurde breekpunt vastpakken om de uitstrijk te maken.

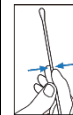



2. Afname van vagina uitstrijk

- Gebruik de droge wattenstok voor het maken van een uitstrijk van de vagina.
- Breng de wattenstok tot het gekleurde breekpunt in de vagina
- Draai voorzichtig de wattenstok 30 seconden rond.
- Zorg ervoor dat de wattenstok de vaginawanden raakt.
- Na afname de wattenstok uit de vagina halen.

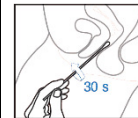

3.

- Plaats de wattenstok in de buis en breek de wattenstok voorzichtig op het gekleurde breekpunt af.
- Het afgebroken stuk in uw hand mag weggegooid worden.
- De vloeistof moet in de buis blijven!
- Schroef de dop op de buis.
- Voorkom lekkage door de dop goed aan te draaien!
- Na afsluiten; de buis 3 – 5 keer voorzichtig schudden.

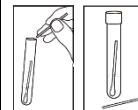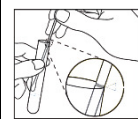

4.


Bij gebruik van aanvraagformulier:
schrijf op de buis:

- de naam en geboortedatum van de patiënt
 - herkomst/ afnameplaats van het materiaal
- Of

Maak elektronische order aan:

Plak ordersticker met naam en geboortedatum op de buis
Vermeld herkomst/ afnameplaats van het materiaal op de sticker

Verzend/ breng de buis met aanvraagformulier/order (klinische gegevens, evt. antibiotica in de laatste 48 uur, zwanger ja/nee) naar het RLM


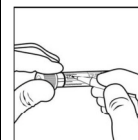


Afname-instructie voor urine *N. gonorrhoeae*/ *Chl. trachomatis*

Nodig:

Urinepotje (**steriel**, met **naald in deksel**)

Urinebuisje met **beige** dop

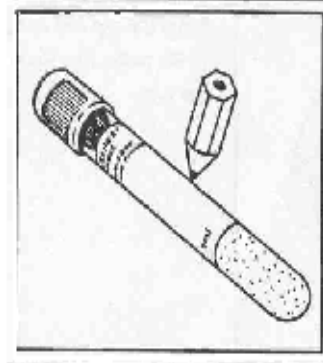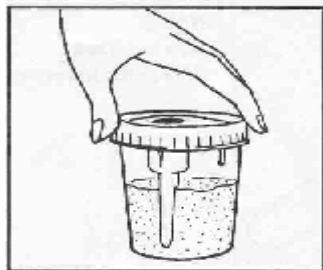

Voor het plassen handen wassen

Eerste portie urine (15-20 ml) in urinepotje
(bij voorkeur ochtendurine, maar minimaal 1 uur na
laatste keer plassen)

Sluit potje goed

Trek papieren label van potje
Prik de buis met de **beige** dop naar beneden in de naald
van het urinepotje
Buis vult zich vanzelf. (buis **volledig** vullen)
Plak papieren label terug op opening van potje
Gooi urinepotje weg

Schrijf naam en geboortedatum op buis met **beige** dop
Of
Plak ordersticker op buis met **beige** dop

Zo snel mogelijk na afname:

Verzend/ breng buis met aanvraagformulier ingevuld
door de arts of elektronische order naar het RLM.