

Afname-instructie voor Urinekweek (1^{ste} lijn)






Regionaal Laboratorium
Medische Microbiologie
Dordrecht | Gorinchem



Nodig:

Urinepotje (**steriel**, met **naald in deksel**)

Urinebuis met **groene** dop

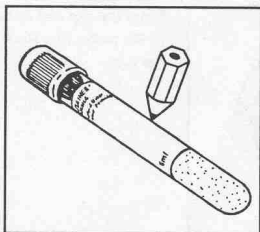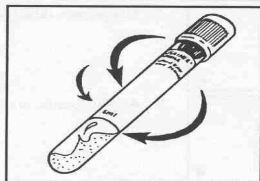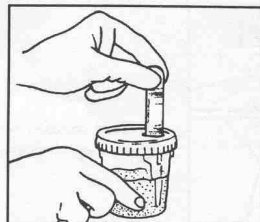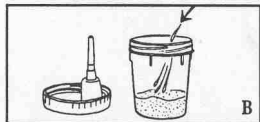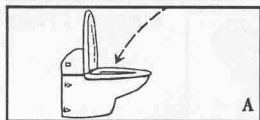

Voor het plassen handen wassen

Vrouwen: reinig binnenzijde van de kleine schaamlippen met een vochtig doekje

Mannen: reinig de glans-penis/ eikel met een vochtig doekje

Eerste geloosde urine in toilet

Tweede portie in steriel urinepotje

Sluit potje goed

Trek papieren label van potje

Prik de buis met de **groene** dop naar beneden in de naald van het urinepotje

Buis vult zich vanzelf

Plak papieren label terug op opening van potje

Gooi urinepotje weg


Zwenk de buis met urine 5 maal

Zet naam en geboortedatum op buis met **groene** dop

Zo snel mogelijk na afname:

Verzend/ breng buis met aanvraagformulier ingevuld door huisarts (klinische gegevens, evt. antibiotica in de laatste 48 uur, zwanger ja/nee) naar het RLM

Afname-instructie voor eSwab

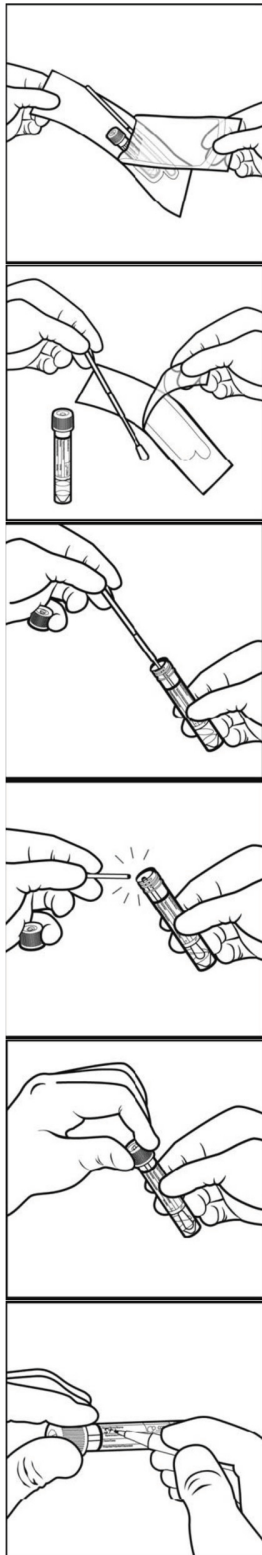

Open de verpakking

Haal de swab eruit

Let op: De swab **boven** het gekleurde breekpunt vastpakken om de uitstrijk te maken

Neem materiaal af bij de patiënt

Open de buis en doe de swab er in

De vloeistof moet in de buis blijven!
Bij verlies van vloeistof, pak een nieuwe buis

Breek de swab af op het gekleurde breekpunt
Het afgebroken stuk in uw hand mag weggegooid worden.

Schroef de dop op de buis

Voorkom lekkage door de dop goed aan te draaien!

Bij gebruik van aanvraagformulier:
schrijf op de eSwab:

- de naam en geboortedatum van de patiënt
- herkomst/ afnameplaats van het materiaal

Of

Maak electronische order aan:

Plak ordersticker met naam en geboortedatum op de eSwab

Vermeld herkomst/ afnameplaats van het materiaal op de sticker

Verzend/ breng de eSwab met
aanvraagformulier/order
(klinische gegevens, evt. antibiotica in de laatste
48 uur, zwanger ja/nee) naar het RLM