


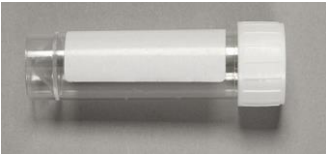

Aanvrager 1 ste lijn ; afname materialen medische microbiologie

Materiaalsoort	Afname materiaal	Omschrijving	Stempel
Urinekweek (midstream, zie afname instructie)		Urinebuis met groene dop, boorzuur op bodem. Let op: niet gebruiken voor SOA!	urine kweek (groen)
N. gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis PCR <u>Man:</u> Urine first void. (zie afname instructie) Let op: beige dop!!		Man: urinebuis met beige dop	♂ man urine NG/CT (beige)
N. gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis PCR <u>Vrouw:</u> Uitstrijk: vagina (Kan evt. zelf door de vrouw afgenomen worden, zie afname instructie)		Vrouw: Buis met gele dop. Let op: medium in de buis laten zitten!	♀ vrouw uitstrijk NG/CT
Neisseria gonorrhoeae kweek (voor resistentiebepaling) Uitstrijk: vagina, urethra, etc.		eSwab klein met oranje dop	eSwab klein
Feces (bacterieel en viraal)		Potje met schepje	feces
Uitstrijkjes Genitaliën/ mond/ keel/ neus/ oor/ oog/ perineum/ huid/ wond/ blaasjes/ etc. wond/ blaasjes/ laesies /oppervlakte kweken etc. <u>Voor:</u> Banale kweek Candida/ schimmel Virus Kinkhoest Trichomonas vaginalis (voor afname zie de afname instructie)	 	eSwab met roze dop Voor afnameplekken die moeilijk te bereiken zijn: eSwab klein met oranje dop	eSwab eSwab klein
Sputum (alle onderzoeken, incl TBC) Schilfers/ haar/ nagels (Schimmelonderzoek)		Potje zonder schep	Sputum
BRMO/MRSA	Inhoud speciale RLM-enveloppe. -voorgedrukt aanvraagformulier + 4 eSwabs (+1 reserve) -voor evt. extra afnames volgens protocol: apart aanvraagformulier en afnamemateriaal insturen.		BRMO MRSA

Let op verloopdatum van de afnamematerialen	
www.rlm-microbiologie.nl	Afnamematerialen zijn via de website te bestellen Bewaarcondities, benodigde hoeveelheid en doorlooptijden zijn te vinden op de website. Afname instructie is digitaal beschikbaar en zit in de RLM enveloppen
Bel voor vragen: contactpersoon RLM	Anneke Plaisier-van Hoek 078-6545027 Email: w.a.hoek@rlm-microbiologie.nl