
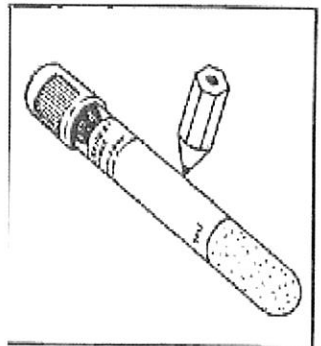
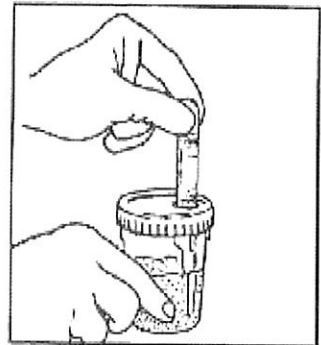
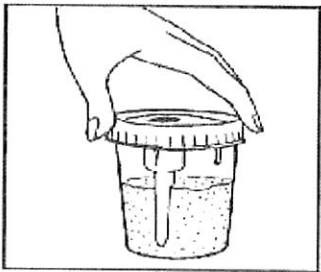


Afname-instructie voor urine *N. gonorrhoeae*/ *Chl. trachomatis*

Nodig:

Urinepotje (**steriel**, met **naald in deksel**)

Urinebuisje met **beige** dop

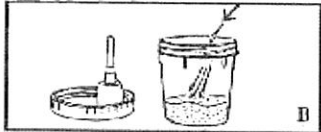

Voor het plassen handen wassen

Eerste portie urine (15-20 ml) in urinepotje
(bij voorkeur ochtendurine, maar minimaal 1 uur na
laatste keer plassen)

Sluit potje goed

Trek papieren label van potje
Prik de buis met de **beige** dop naar beneden in de naald
van het urinepotje
Buis vult zich vanzelf. (buis **volledig** vullen)
Plak papieren label terug op opening van potje
Gooi urinepotje weg

Schrijf naam en geboortedatum op buis met **beige** dop
Of
Plak ordersticker op buis met **beige** dop

Zo snel mogelijk na afname:

Verzend/ breng buis met aanvraagformulier ingevuld
door de arts of elektronische order naar het RLM.