
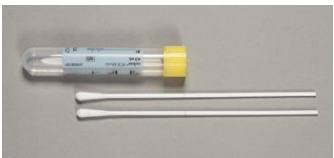


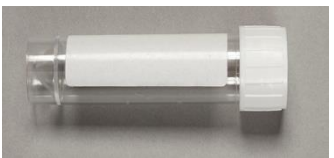

## Aanvrager 1 ste lijn ; afname materialen medische microbiologie

| Materialensoort                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Afname materiaal                                                                                                                                                                                   | Omschrijving                                                                                                     | Stempel                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Urinekweek</b><br>(midstream, zie afname instructie)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Urinebuis met <b>groene</b> dop, boorzuur op bodem.<br>Let op: niet gebruiken voor SOA!                          | urine kweek<br>(groen)          |
| <b>N. gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis PCR</b><br><br><u>Man:</u><br>Urine first void.<br>(zie afname instructie)<br>Let op: <b>beige</b> dop!!                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | Man:<br>urinebuis met <b>beige</b> dop                                                                           | ♂ man<br>urine NG/CT<br>(beige) |
| <b>N. gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis PCR</b><br><br><u>Vrouw:</u><br>Uitstrijk: vagina<br>(Kan evt. zelf door de vrouw afgenomen worden, zie afname instructie)                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Vrouw:<br>Buis met gele dop.<br><br>Let op: medium in de buis laten zitten!                                      | ♀ vrouw<br>uitstrijk NG/CT      |
| <b>Neisseria gonorrhoeae kweek</b><br>(voor resistentiebepaling)<br><br>Uitstrijk: vagina, urethra, etc.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | eSwab <b>klein</b><br>met oranje dop                                                                             | eSwab<br>klein                  |
| <b>Feces</b><br>(bacterieel en viraal)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Potje met schepje                                                                                                | feces                           |
| <b>Uitstrijkjes</b><br>Genitaliën/ mond/ keel/ neus/ oor/ oog/ perineum/ huid/ wond/ blaasjes/ etc.<br>wond/ blaasjes/ laesies/ oppervlakte kweken etc.<br><br><u>Voor:</u><br>Banale kweek<br>Candida/ schimmel<br>Virus<br>Kinkhoest<br>Trichomonas vaginalis<br>(voor afname zie de afname instructie) | <br>                         | eSwab met roze dop<br><br>Voor afnameplekken die moeilijk te bereiken zijn:<br>eSwab <b>klein</b> met oranje dop | eSwab<br><br>eSwab klein        |
| <b>Sputum</b><br>(alle onderzoeken, incl TBC)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | Potje zonder schep                                                                                               | Sputum                          |
| <b>Schilfers/ haar/ nagels</b><br>(Schimmelonderzoek)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                 |
| <b>BRMO/MRSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Inhoud speciale RLM-enveloppe.</b><br>-voorgedrukt aanvraagformulier + 4 eSwabs (+1 reserve)<br>-voor evt. extra afnames volgens protocol: apart aanvraagformulier en afnamemateriaal insturen. |                                                                                                                  | BRMO<br>MRSA                    |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Let op <b>verloopdatum</b> van de afnamematerialen                     |                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |  |
| <a href="http://www.rlm-microbiologie.nl">www.rlm-microbiologie.nl</a> | Afnamematerialen zijn via de website te bestellen<br>Bewaarcondities, benodigde hoeveelheid<br>Doorlooptijden zijn te vind<br>Afname instructie is digitaal beschikbaar en zit in de RLM enveloppen |  |
| Bel voor vragen:<br>contactpersoon RLM                                 | Anneke Plaisier-van Hoek<br>078-6545027<br>Email: <a href="mailto:w.a.hoek@rlm-microbiologie.nl">w.a.hoek@rlm-microbiologie.nl</a>                                                                  |  |